

NATURE'S ANSWER TO BREATHING EASIER

INHÄLO DSI™


DRY SALT INHALER

100% NATÜRLICH

NASAL TROCKENSALZ INHALATOR
FÜR DIE BEHANDLUNG DER
OBEREN ATEMWEGE

ENTHÄLT 90 TAGE VERWENDBARE
SALZKARTUSCHE UND AROMA STICK

NEU

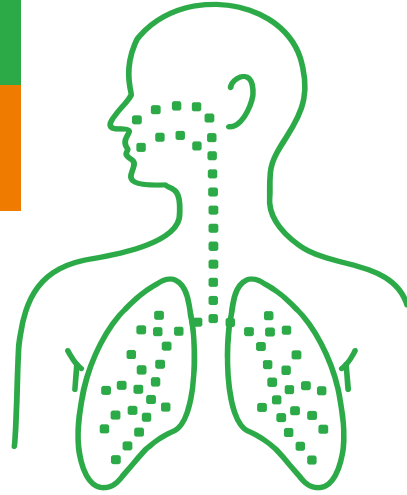

reddot design award
winner 2012



TIEF, BIS IN NEBENHÖLEN
VORDRINGENDES TROCKENSALZ
AEROSOL ZUR LINDERUNG VON:

- BESCHWERDEN DER OBEREN ATEMWEGE
- ALLERGISCHEN SYMPTOMEN

NATÜRLICH - SICHER & EFFEKTIV

ENTHÄLT: GEBRAUCHSFERTIGEN TROCKENSALZ AEROSOL INHALATOR MIT SALZKARTUSCHE
5 GRAMM NATÜRLICHES, UNBEHANDELTES STEINSALZ


ÜBER DIE SALZ AEROSOL THERAPIE Bei der Salzlufthherapie wird Salzaerosol (in Luft gelöste Nano-Salzbestandteile) eingeatmet. Die Behandlungsmethode kann bei nahezu allen Arten von Atemwegserkrankungen angewendet werden und ist zu 100% natürlich, sehr gut verträglich und frei von Nebenwirkungen. Das eingeatmete Salzaerosol wirkt antibakteriell und entzündungshemmend, es kann Krankheitserreger auf den Schleimhäuten dezimieren, fördert die Verflüssigung von Schleim und erleichtert damit das Abhusten. Es kann Entzündungen der Bronchien, des Rachens und der Nebenhöhlen lindern und die Heilung beschleunigen. Das Einatmen von Salzaerosol erhöht zusätzlich die Aufnahmefähigkeit von Sauerstoff in der Lunge und wirkt positiv auf das Immunsystem.

INHALO DSI NASAL PRODUKTINFORMATION

- Der INHALO DSI NASAL enthält 5 Gramm natürliches, handselektiertes Steinsalz aus der Salina Pride. Bestandteile in unterschiedlichen Verhältnissen: Natriumchlorid, Magnesium, Kalzium in ihrer natürlich vorkommenden Form.
- Anwendungsgebiete: Erkältung mit verstopfter Nase, Heuschnupfen, Nebenhöhlenentzündung, Stirnhöhlenentzündung, sowie Reizungen der oberen Atemwege im Allgemeinen.
- Aroma-Stift (nur NASAL-Version):** Die im Aroma-Stift enthaltenen ätherischen Öle aus Menthol, Rizinus, Eukalyptus, grüner Minze, Pfefferminz, Lavendel und Nelken entfalten gemeinsam mit dem Trockensalz Aerosol ihre wohltuende Wirkung, verschaffen Linderung und lassen Sie wieder besser durchatmen.

Verwendung des INHALO DSI NASAL, nasale Inhalation (obere Atemwege)

- Nehmen Sie die untere, transparente Kappe des INHALO DSI NASAL ab.
- Entnehmen Sie den Aroma-Stift aus dem Blister und legen Sie ihn in die kleine, weiße Abdeckkappe.
- Anschließend setzen Sie die kleine, weiße Abdeckkappe mit dem Aroma-Stift unten auf den INHALO DSI NASAL auf, darüber die transparente Kappe. **Hinweis:** Nach dem Einlegen des Aroma-Sticks, bitte Hände waschen. Etwaige ätherische Ölrückstände an den Fingern können, bei Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vorübergehende Reizungen hervorrufen!
- Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
- Führen Sie vorsichtig das grüne Nasenstück des INHALO DSI NASAL in die Nase ein und **atmen Sie tief durch das Gerät ein.** Beim Einatmen durch das Gerät das freie Nasenloch zuhalten. Nach dem Einatmen nehmen Sie das Gerät von der Nase und atmen durch den Mund wieder aus. **Hinweis:** Nicht in das Gerät ausatmen, da sich dadurch Feuchtigkeit im Gerät sammelt und die Salzkristalle verkleben können. Nach dem Gebrauch die Schutzkappe wieder aufsetzen. **Dosierung:** Für eine ideale Wirksamkeit mit Aroma-Stift, verwenden Sie den DSI INHALO NASAL in täglichen Anwendungen von gesamt 10 Minuten. Die Anwendungen können Sie über die den Tag, nach Belieben, aufteilen. Wir empfehlen: 5 Sitzungen über den Tag verteilt, von je 2 Minuten. Bei akuten Beschwerden der oberen Atemwege und Allergieschüben können Sie die tägliche Anwendung auf bis zu 15 Minuten steigern. Verwendung der INHALO DSI NASAL **ohne Aroma-Stift:** Verwenden Sie das Gerät, für eine ideale Wirksamkeit, täglich 15 bis 20 Minuten, bei akuten Beschwerden der oberen Atemwege und Allergieschüben können Sie die tägliche Anwendung auf bis zu 30 Minuten steigern.

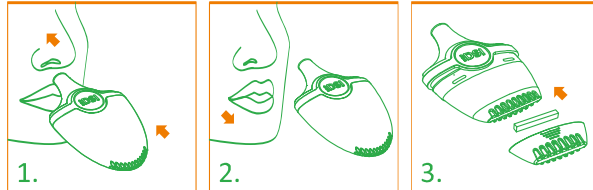

Warnhinweise

- Verwenden Sie den INHALO DSI NASAL nicht im Falle einer Lungenentzündung!**
- Bei schweren und chronischen Erkrankungen der Atemwege, Herzerkrankungen und/oder Bluthochdruck sowie Schwangerschaft, stimmen Sie eine Verwendung vorher mit Ihrem Arzt oder Apotheker ab!
- Von einer gemeinsamen Nutzung des Gerätes von mehreren Personen wird abgeraten! (Gegeninfektion!)
- Der INHALO DSI NASAL ist kein Ersatz für eine Medikation und sollte im Falle einer parallelen medikamentösen Therapie, in Abstimmung mit Ihrem Arzt oder Apotheker erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen!
- Nicht schütteln oder fallen lassen!
- ACHTUNG: Enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Erstickungsgefahr! Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!** Nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet! Bei Kindern unter 5 Jahren wird die Verwendung des INHALO DSI Nasal mit Aroma-Stift nicht empfohlen! Bei Kindern unter 5 Jahren wird eine Aufsicht durch Erwachsene bei der Anwendung empfohlen!
- Verwenden Sie den Aroma-Stift des INHALO DSI NASAL nicht, wenn Sie an einer Überempfindlichkeit gegen ätherisches Öle leiden! Nach dem Einlegen des Aroma-Sticks, bitte sorgfältig Hände waschen! Etwaige ätherische Ölrückstände an den Fingern können, bei Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten, vorübergehende Reizungen hervorrufen!

Weitere Informationen

- Nach der ersten Anwendung ist das Gerät 90 Tage bzw. 3 Monate verwendbar.
- Trocken und bei Temperaturen von 15°C bis 30°C lagern.
- Über den QR-Code, unten Mitte, gelangen Sie auf unsere Homepage.
- Die Chargennummer finden Sie unten links.
- Bewahren Sie diese PatienteninFORMATION auf.

Wartung Um Verstopfungen durch Salzkristalle zu beseitigen, verwenden Sie bitte eine Nadel oder eine Büroklammer, damit die Luft wieder ungehindert durch das Filtersieb strömen kann. Das Äußere des INHALO DSI NASAL kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Das Mund- bzw. Nasenstück kann abgenommen und mit warmem Leitungswasser gespült werden. Vor dem Zusammensetzen bitte gründlich trocknen.

Zulassungs- & Rechteinhaber, sowie Vertrieb durch:
INHALO DSI HUNGARY KFT. (GmbH)
VIZÖNTÖ UTCA 4, H-2030 ÉRD, UNGARN
www.inhalodsi.eu / info@inhalodsi.eu

 Patent angemeldet
Hergestellt in Ungarn, EU
Medizinprodukt Klasse 1

Verpackungsinhalt: 1 Stück INHALO DSI Nasal + 1 Stück Aroma-Stick
Item No 00-100-01

Lot No

N18PA1S1A01

