

NATURE'S ANSWER TO BREATHING EASIER

# INHALO DSI™

DRY SALT INHALER

100% NATUURLIJK


100% NATUURLIJK

## BRONCHIAL

ZOUTINHALATOR  
VOOR DE BEHANDELING VAN DE  
ONDERSTE LUCHTWEGEN

BEVAT 90 DAGEN BRUIKBARE  
ZOUTCARTOUCHE

NEU

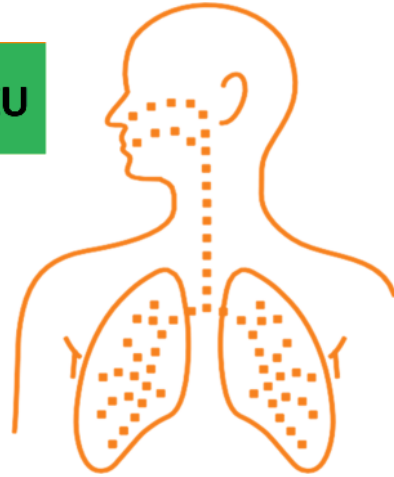

Diep, tot in de bronchiën  
binnendringend droog zout voor de  
verlichting van:

- aandoeningen aan de onderste luchtwegen
- allergische symptomen



reddot design  
award  
winner 2012

NATUURLIJK - VEILIG & EFFECTIEF

BEVAT: KANT-EN-KLARE INHALATOR VOOR ZOUTAEROSOLEN MET  
ZOUTCARTOUCHE

5 GRAM NATUURLIJK, ONBEHANDELD STEENZOUT

**OVER DE ZOUTTHERAPIE** Bij de zouttherapie worden zoutaerosolen (in lucht opgeloste nano-zoutbestanddelen) ingeademd. Deze behandelingsmethode kan voor vrijwel alle soorten luchtwegaandoeningen worden ingezet en is voor 100% natuurlijk, wordt zeer goed verdragen en geeft geen bijwerkingen. De ingeademde zoutaerosolen werken antibacterieel en ontstekingsremmend, ziekteverwekkers op de slijmvliezen kunnen worden gedecimeerd, het vloeibaar maken van slijm wordt bevordert en zodoende wordt het afhoesten vergemakkelijkt. De behandeling kan ontstekingen in de bronchiën, de keelholte en de bijholtes verminderen en de genezing versnellen. Het inademen van zoutaerosolen verhoogt tevens het opnamevermogen van zuurstof in de longen en heeft een positief effect op het immuunsysteem.


### INHALO DSI BRONCHIAL PRODUCTINFORMATIE

- De INHALO DSI BRONCHIAL bevat 5 gram natuurlijk, met de hand geselecteerd steenzout uit de zoutgroeve 'Salina Praid'. Bestanddelen in verschillende verhoudingen: natriumchloride, magnesium, calcium in de natuurlijk voorkomende vorm. Toepassingsgebieden: verkoudheid met hoest, hooikoorts, astma, bronchitis, COPD, kriebelhoest, rokershoest alsook algemene irritaties van de onderste luchtwegen, ontstekingen en wonden in de mond en keelholte (na een operatie aan de tanden of amandelen).

#### Gebruik van de INHALO DSI BRONCHIAL

##### Orale inhalatie (onderste luchtwegen)

1. Verwijder de beschermkap.
2. Omsluit het oranje mondstuk met uw lippen en adem diep via het apparaat in.
3. Verwijder de INHALO DSI BRONCHIAL na het inademen van uw mond en adem door de neus weer uit.

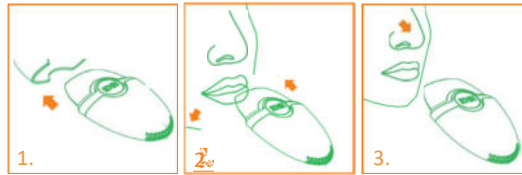

**Opmerking:** Niet in het apparaat uitademen, omdat zich hierdoor vocht in het apparaat ophoopt en de zoutkristallen kunnen gaan klonteren. Plaats na gebruik de beschermkap terug. **Aanbeveling:** Drink voor gebruik enkele slokken water om het mondslijmvlies te bevochtigen. U mag direct na het gebruik niet meteen drinken. Wacht na gebruik 5 minuten. **Dosering:** Voor een ideale werkzaamheid gebruikt u de INHALO DSI BRONCHIAL in dagelijkse sessies van in totaal 15 tot 20 minuten.

U kunt de sessies geheel naar wens over de dag verdelen. Wij raden aan: 4 sessies over de dag verdeeld, van elk 4 tot 5 minuten. Bij acute luchtweg-/verkoudheidsklachten en hevige allergische reacties kunt u het dagelijkse gebruik tot maximaal 30 minuten verlengen. Na het gebruik zult u eventueel enkele minuten een licht zoute smaak in uw mond proeven. Dat is normaal en geeft aan dat het zoutaerosol werd ingeademd en dat u de INHALO DSI BRONCHIAL correct hebt gebruikt.

#### Waarschuwingen

- **Gebruik de INHALO DSI BRONCHIAL niet ingeval van een longontsteking!**
- Bij ernstige en chronische aandoeningen van de luchtwegen, hartaandoeningen en/of hoge bloeddruk alsook zwangerschap dient u voor het gebruik eerst uw arts of apotheker te raadplegen!
- U moet het apparaat bij voorkeur niet samen met andere personen gebruiken! (Wederzijdse infectie!)
- De INHALO DSI BRONCHIAL vormt geen vervanging voor medicatie en ingeval van een gelijktijdige medicamenteuze behandeling dient u uw arts of apotheker te raadplegen!
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat terecht kan komen!
- Niet schudden of laten vallen!
- **LET OP: Bevat kleine onderdelen die ingeslikt of ingeademd kunnen worden. Verstikkingsgevaar! Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar! Kinderen onder 5 jaar dienen bij gebruik door een volwassene in de gaten te worden gehouden!

#### Meer informatie

- Na het eerste gebruik kan het apparaat 90 dagen resp. 3 maanden worden gebruikt.
- Droog en bij temperaturen tussen 15°C en 30°C bewaren.
- Via de QR-code, onder in het midden, gaat u naar onze homepage.
- Het chargenummer staat links onder.
- Bewaar deze patiëntinformatie.

**Onderhoud** Om verstoppingen door zoutkristallen te verwijderen, gebruikt u een naald of een paperclip, zodat de lucht weer ongehinderd door de filterzeef kan stromen. De behuizing van de INHALO DSI BRONCHIAL kan met een vochtige, zachte doek worden gereinigd. Het mond- resp. neusopzetstuk kan worden verwijderd en met warm water worden afgespoeld. Laat het eerst volledig drogen, voordat u het terugplaatst.

Vergunninghouder & rechthebbende en verkoop via:  
INHALO DSI HUNGARY KFT. (GmbH)  
VIZÖNTÖ UTCA 4, H-2030 ÉRD, HONGARIJE  
[www.inhalodsi.eu](http://www.inhalodsi.eu) / [info@inhalodsi.eu](mailto:info@inhalodsi.eu)

Octrooi aangemeld  
CE Geproduceerd in Hongarije  
Medisch hulpmiddel klasse  
1

Verpakkingsinhoud: 1 stuk INHALO DSI Bronchial  
Item No 00-200-01

Lot No

B18PA1S1A01

